

CANNEFF® supposte

Dispositivo medico certificato di Classe IIa

prodotto in conformità con la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio e successive modifiche. Iscritto nel registro ceco dei dispositivi medici

Principi attivi in una supposta

Cannabidiolo (CBD): 100 mg

Ialuronato di sodio: 6.6 mg

CANNEFF® VAG SUP è l'unico **dispositivo medico certificato di classe IIa contenente CBD destinato all'uso vaginale**. Prodotto registrato nell'UE in attesa di brevetto.

Le supposte vaginali sono utilizzate come trattamento coadiuvante nei processi di guarigione delle condizioni di **atrofia e distrofia della mucosa vaginale**. Favoriscono la **guarigione dopo il parto o dopo un intervento chirurgico ginecologico**, nei casi di **distrofia** come esito di chemioterapia o radiazioni ionizzanti, o in caso di **secchezza vaginale**, anche dovuta a carenza di estrogeni. Portano sollievo da **sintomi e disagi vaginali dopo aver trattato un'infezione vaginale o una micosi vaginale**.



- ✓ secchezza vaginale
- ✓ disagio vaginale
- ✓ dolore nei rapporti sessuali
- ✓ distrofia vaginale

CANNEFF® SUP è l'unico **dispositivo medico di classe IIa contenente CBD destinato all'uso rettale**. Prodotto registrato nell'UE in attesa di brevetto.

Le supposte rettali sono utilizzate come trattamento coadiuvante per favorire la guarigione del canale anale **in seguito a operazioni proctologiche**, in caso di **emorroidi interne ed esterne, proctiti, criptiti, ragadi anali, lacerazioni, o fistole perianali** (infezioni aspecifiche)



- ✓ infiammazioni aspecifiche dell'intestino
- ✓ ragadi e lesioni
- ✓ emorroidi
- ✓ proctiti



RIVOLUZIONARIA SOLUZIONE
AL CBD PER I TUOI
PROBLEMI DI SALUTE
INTIMA

Cure mediche non ormonali
del 21° secolo.

UN RAPIDO SOLLIEVO DAL
DOLORE E DAL DISAGIO




CANNEFF® VAG SUP

TERAPIA NON ORMONALE

Squilibri degli ormoni femminili

Normali fluttuazioni nei livelli di ormoni appartenenti al gruppo degli estrogeni e del progesterone possono avvenire naturalmente, ad esempio, durante la pubertà, prima e durante le mestruazioni, in gravidanza, in perimenopausa o durante la menopausa. Squilibri ormonali su scala più ampia sono associati, tra l'altro, alla sindrome premestruale e a mestruazioni dolorose. Nei casi in cui gli estrogeni sono gli ormoni dominanti, può svilupparsi endometriosi.



Che siano naturali o eccessive, le fluttuazioni ormonali sono sempre associate a difficoltà fisiche e psicologiche analoghe alle condizioni sopra elencate. In alcuni casi, i sintomi sono così gravi da interferire con il lavoro, le attività sociali o le relazioni e la qualità della vita in molte aree. Queste difficoltà includono principalmente disturbi dell'umore (ansia, depressione), disturbi del sonno, mestruazioni dolorose (dismenorrea) e dolore all'area vaginale durante il rapporto sessuale e, nello specifico, durante la penetrazione (dispareunia). Inoltre portano a disagi vaginali (secchezza vaginale, prurito) e, in menopausa, ad atrofia vaginale.



QUANDO ASSUMERE le supposte vaginali CANNEFF® VAG SUP

- ✓ Per il sollievo da secchezza vaginale, prurito e disagi da menopausa e sindrome premestruale, derivanti da uno squilibrio ormonale nei livelli di estrogeni, anche accompagnati da endometriosi
- ✓ Per una guarigione più rapida delle lesioni vaginali in seguito ad asportazione di tessuto cervicale affetto da alterazioni patologiche
- ✓ Per accelerare la guarigione e ridurre il sanguinamento durante il trattamento di cerviciti (infiammazioni della cervice uterina) causate da infezioni a trasmissione sessuale, di lesioni alla cervice provocate da un oggetto estraneo (es. dispositivi per il controllo delle nascite) o di cancro cervicale
- ✓ Per una guarigione più rapida dalle lesioni vaginali dopo un intervento chirurgico
- ✓ Per una guarigione più rapida delle lesioni vaginali legate al parto
- ✓ Per una guarigione più rapida delle lesioni vaginali come esito di radioterapia all'area pelvica
- ✓ Per il trattamento di atrofia vaginale, secchezza e prurito della mucosa vaginale dovuti alla menopausa
- ✓ In caso di dolore nei rapporti sessuali
- ✓ Per portare sollievo in caso di reazioni avverse a chemioterapia o a trattamento ormonale di tumori estrogeno-dipendenti (ad es. carcinoma mammario)
- ✓ Per il sollievo dai disagi vaginali conseguenti al trattamento di infiammazioni vaginali o micosi.



CANNEFF
VAG SUP

Dosaggio e durata del trattamento

Assumere una supposta al giorno, preferibilmente la sera o come consigliato dal proprio medico. La durata del trattamento dipende dallo sviluppo della condizione da trattare e non dovrebbe superare i 30 giorni.

- Per la guarigione della mucosa in seguito a intervento chirurgico, parto, conizzazione cervicale o trattamento di una cervicite; durante e dopo radioterapia all'area pelvica: 1 supposta al giorno prima di coricarsi per 15 – 20 giorni.
- Per il sollievo e la guarigione della mucosa in caso di vaginite atrofica o distrofica, anche in caso di radioterapia alla zona pelvica, o dopo il parto: 1 supposta al giorno prima di coricarsi per 20 – 30 giorni.
- Per alleviare il dolore nei rapporti sessuali: 1 supposta al giorno prima di coricarsi per 2 – 3 giorni prima del rapporto sessuale pianificato e 1 supposta al giorno un'ora prima di avere il rapporto.
- Per alleviare i sintomi derivanti dal trattamento di infiammazioni, infezioni o micosi vaginali: 1 supposta 3 volte a settimana per 30 giorni.
- Per il sollievo da secchezza vaginale, prurito o disagi causati da menopausa, terapie per il controllo delle nascite, o chemioterapia: 1 supposta al giorno prima di coricarsi per 20 – 30 giorni.
- Per il sollievo da secchezza vaginale, prurito o disagi causati dalla sindrome premestruale: 1 supposta al giorno prima di coricarsi per 2-5 giorni prima delle mestruazioni

L'effetto si avrà entro 60 minuti dall'applicazione.

QUANDO ASSUMERE le supposte rettali CANNEFF® SUP

- ✓ Come trattamento coadiuvante in caso di emorroidi interne ed esterne (diminuzione di dolore, prurito e disagio causati dalle emorroidi)
- ✓ Per favorire la guarigione di piccole o più profonde fissurazioni e ulcere nella regione anale, fistole perianali e ferite da chirurgia coloretale
- ✓ Per lenire i sintomi di infiammazioni intestinali aspecifiche



Dosaggio e durata del trattamento

Assumere una supposta al giorno, preferibilmente la sera o come consigliato dal proprio medico.

La durata del trattamento dipende dallo sviluppo della condizione da trattare e non dovrebbe superare i 30 giorni.

- Come terapia ausiliaria per emorroidi interne ed esterne: 1 supposta la sera per 5-15 giorni sino a risoluzione del problema
- Per favorire la guarigione di fissurazioni e fistole anali in seguito a chirurgia coloretale: 1 supposta la sera per 20-30 giorni.
- Per lenire infiammazioni aspecifiche come proctiti, criptiti, ecc.: 1 supposta la sera per 25-30 giorni.

L'effetto si avrà entro 60 minuti dall'applicazione.

CANNEFF® VAG SUP

CANNEFF® SUP

Due principi attivi:

- IALURONATO DI SODIO (6,6mg)
- CANNABIDILOLO (CBD) (100mg)

IN UNA MATRICE DI EMULSIONE ESPRESSAMENTE SVILUPPATA
E SOGGETTA A PROTEZIONE BREVETTUALE.

A differenza delle supposte a formulazione classica,

**LE SUPPOSTE CANNEFF® GARANTISCONO IL
COMPLETO RILASCIO (100%) DELLO
IALURONATO DI SODIO**

Lo ialuronato di sodio favorisce la guarigione della mucosa vaginale, allevia il dolore, l'infiammazione, l'irritazione, il gonfiore e il prurito; è raccomandato per lenire le conseguenze di trattamenti aggressivi di infiammazioni e micosi vaginali e favorisce la guarigione da traumi e ferite dopo un intervento chirurgico o radioterapia. Può essere utilizzato per alleviare i sintomi di secchezza e disagio vaginali, mestruazioni dolorose e dolore nei rapporti sessuali dovuti ad uno squilibrio di estrogeni.


Il cannabidiolo in combinazione con lo ialuronato di sodio apre a possibilità terapeutiche più ampie, soprattutto nell'area dei disturbi psicologici.

FORMULAZIONE INNOVATIVA

Lo ialuronato di sodio è contenuto in una serie di altri preparati, ma per produrre l'effetto desiderato è necessario averlo in forma di soluzione acquosa esattamente come nel corpo umano.

Le supposte CANNEFF® sono prodotte utilizzando una matrice di emulsione espressamente sviluppata e soggetta a protezione brevettuale.

Questa matrice permette il completo rilascio (100%) dello ialuronato di sodio dopo 45 minuti dall'inserimento. In una supposta convenzionale, che è una mera sospensione in un mezzo lipofilo, solo il 20% del contenuto originale viene rilasciato.

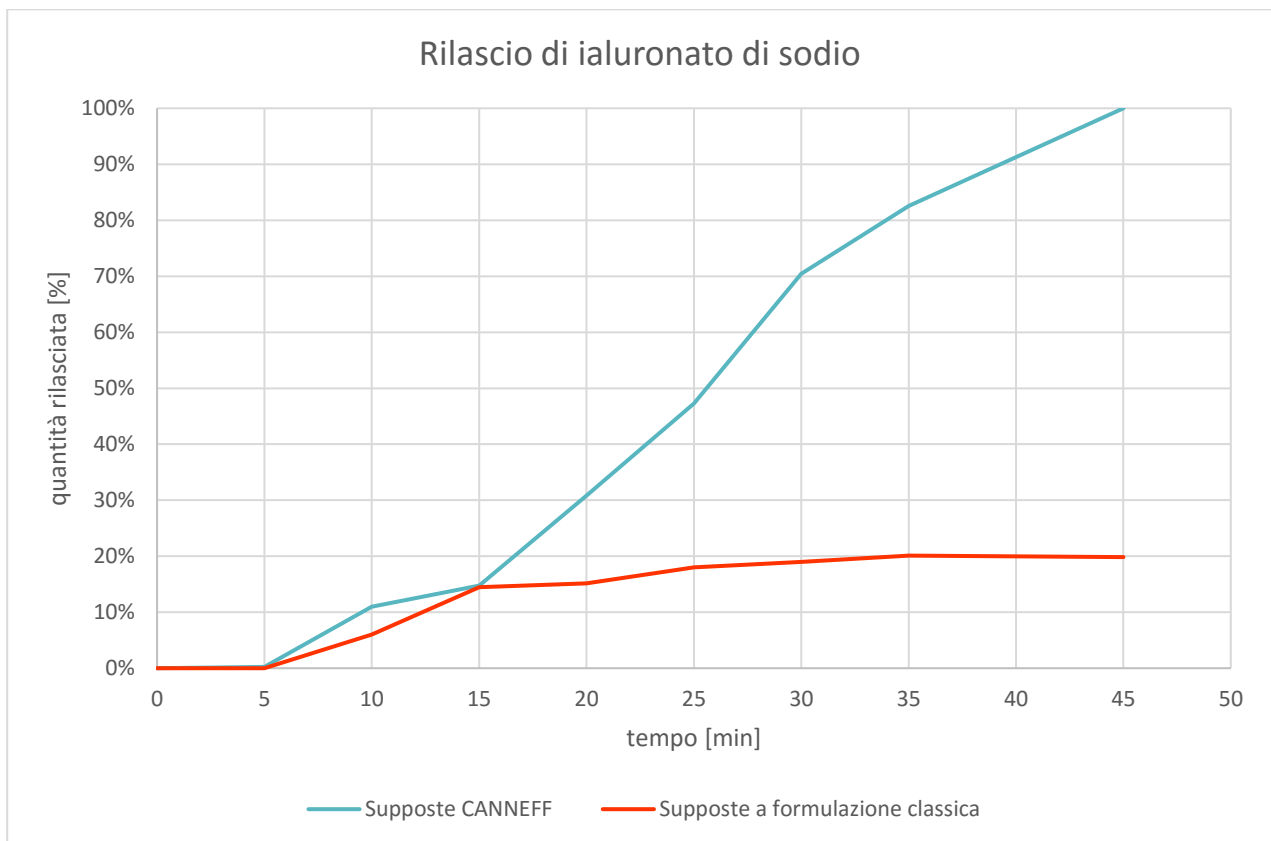

Ingredienti CANNEFF® SUP e CANNEFF® VAG SUP

Acido ialuronico sale iodico, cannabidiolo, glicerolo monostearato, grasso solido, acqua purificata.

DISPOSITIVO MEDICO



Per maggiori informazioni:

www.purexis-medical.ch

info@purexis.ch

Tel. (Svizzera): +41 (0)91 604 67 20

Tel. (Italia): +39 334 744 29 40

Fabbricante:



CB21 Pharma, s.r.o.

Studentská 812/6, Bohunice

625 00 Brno

Importatore e Mandatario svizzero:



CH

REP

Purexis SA
Via Violino 1
CH-6928 Manno

Importatore per l'Italia:



Purexis S.R.L

Via Zanoni 9

I-21037 Lavena Ponte Tresa (VA)